



DESIFOR-forte AF neu

Flüssiges Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und von Flächen aller Art



Einsatzbereich

Aldehydfreies Produkt zur prophylaktischen Routinedesinfektion und Reinigung in medizinischen Einrichtungen, Heimen und der Lebensmittelindustrie für alle wasserfesten Oberflächen und Böden.

Gemäß MPG: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten. Gemäß Biozidprodukte-VO: Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art.

Anwendung

Flächen mit DESIFOR-forte AF neu Lösung wischen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Technische Informationen

Karton mit 9 Dosierrfl. à 1 Liter Art.-Nr. 20491
 Kanister à 5 Liter (Typ "KH", hoch) Art.-Nr. 20492
 Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 20493

Wirkstoffe

10,8g Didecyldimethylammoniumchlorid
 6,0g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05, GHS07, GHS09

BAuA Reg.-Nr. N-84407

CHZN5718



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © O* 20

| Anwendungsgebiet/ Wirksamkeit | Konzentration/ Einwirkzeit | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Humanmedizinischer Bereich: bakterizid und levurozid | 0,5 % 15 Min. | EN 13727, EN 13624, EN 16615, hohe Belastung |
| Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen: bakterizid und levurozid | 0,5 % 15 Min. | EN 13697, hohe Belastung |
| Tuberkulozid (M. terrae) | 0,5 % 60 Min. | EN 14348, niedrige Belastung |
| Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) | 0,5 % 15 Min. | DVV/RKI-Leitlinie |
| Noroviren (MNV) | 1,0 % 60 Min. | EN 14476, hohe Belastung |
| Rotaviren | 0,5 % 15 Min. | EN 14476, niedrige Belastung |
| Polyomaviren (Papovavirus SV 40) | 1,0 % 15 Min. | EN 14476, hohe Belastung |

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 36 Monate
- IHO-gelistet
- VAH-gelistet
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder Test)
- HACCP-konform

Hinweis

- Produkt nicht für Oberflächen geeignet, die Polycarbonat enthalten (z.B. Schutzbrillen)
- Produkt nicht für die Anwendung auf semikritischen Medizinprodukten geeignet

pH conc **0 2 4 6 8 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE